

## Brukarinformation: Frakturortos

Datum: Personnummer:

Ordernummer: Namn:

### Syfte/målsättning:

Ortosen skall stabilisera led och/eller kroppsdel och förhindra onormal rörelse under behandlingstiden.

### Användning:

- Pat får **inte** belasta kroppsdelen
- Patienten får belasta
- Ortosen **skall** användas nattetid
- Ortosen behöver ej användas nattetid
- Ortosen får tas av för luftning och skötsel av kroppsdelen

### Begränsningar och varningar:

Ortosen kan medföra risk för skav och trycksår, speciellt då den är ny. Vid tryckmärken och andra obehag ska man kontakta den ortopedtekniska avdelningen.

### Skötsel och underhåll:

Ortosen kan torkas av med en mild tvållösning och lufttorka. Den får inte torkas i torkskåp eller med varmluftsflön eftersom plasten då kan förändras.

Skydda huden genom att alltid använda en ren strumpa under ortosen.

### Kontakt:

Skaraborgs Ortopedservice AB

Skaraborgs sjukhus Skövde

54185 Skövde

0500 431580

E-mail: [sosab@ortopedservice.se](mailto:sosab@ortopedservice.se)